

Allgemeine Empfehlungen, können je nach Hersteller und Produkt abweichen

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. MASKENSYSTEM | ab 12 Monaten, je nach Zustand |
| 2. SCHLAUCHSYSTEM | ab 12 Monaten, je nach Zustand |
| 3. FEINFILTER | alle 4-6 Wochen |
| 4. GROBFILTER | ab 12 Monaten, je nach Zustand |

ZUBEHÖRBESTELLUNG

Aufgrund unterschiedlicher Abrechnungsmodalitäten mit Ihrer Krankenkasse, benötigen wir ggf. ein kassenärztliches Rezept von Ihrem Arzt, welchem Sie die benötigten Zubehörteile mit der entsprechenden Stückzahl vermerken lassen. Nach Abklärung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse senden wir Ihnen Ihre Bestellung per Paketversand zu.

Bitte erfragen Sie die Notwendigkeit eines Rezeptes in unserem Hause.



GESELLSCHAFT FÜR
MEDIZINTECHNISCHE
VERSORGUNG mbH

NOCH FRAGEN? RUFEN SIE UNS AN!

UNSERE SERVICE-HOTLINE » Tel. 06122 - 75 28 - 0



GESELLSCHAFT FÜR
MEDIZINTECHNISCHE
VERSORGUNG mbH



REINIGUNGSHINWEISE

GMV Gesellschaft für medizintechnische Versorgung mbH

Zentrale Hofheim

Nassaustraße 10
Tel. 06122 - 75 28 - 0
info@gmv-hofheim.de

65719 Hofheim/Ts.
Fax. 06122 - 75 28 - 51
www.gmv-hofheim.de

Filiale Kirkel-Limbach

In den Stockgärten 8
Tel. 06841 - 99 342 - 0
info-saarland@gmv-hofheim.de

66459 Kirkel-Limbach
Fax. 06841 - 99 342 - 22
www.gmv-hofheim.de

Reinigen Sie Gerät und Zubehör stets mit der Hand und beachten Sie die in der Bedienungsanleitung angegebenen Reinigungshinweise. Diese können ggf. von Gerät zu Gerät von den folgenden Empfehlungen abweichen, bzw. diese ergänzen.

1. GERÄT

- ✗ Abreiben mit einem trockenen Staubtuch
- ✗ Nässe schadet der im Inneren des Gerätes befindlichen Elektronik

2. MASKENSYSTEM

- ✗ Mind. 1-2x wöchentlich reinigen (je nach Verschmutzung)
- ✗ Benutzen Sie handwarmes Wasser und ein geeignetes Reinigungsmittel
- ✗ Verschließen Sie evtl. vorhandene Innenschläuche mit den mitgelieferten Verschlussstöpseln
- ✗ Mit klarem Wasser nachspülen und Reinigungsmittelreste wegspülen
- ✗ Vor Gebrauch an der Luft vollständig trocknen lassen

BESONDERS WICHTIG

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese schaden dem Material und können Ihre Gesundheit gefährden.

3. SCHLAUCHSYSTEM

- ✗ Täglich reinigen
- ✗ Ersatzteile (wenn möglich) voneinander trennen und nur im trockenen Zustand die Einzelteile wieder zusammenbauen
- ✗ Mit klarem Wasser nachspülen und Reinigungsmittelreste wegspülen
- ✗ Vor Gebrauch an der Luft vollständig trocknen lassen

4. MASKENHALTERUNG (KOPFBÄNDERUNG)

- ✗ Mind. 1-2x wöchentlich reinigen (je nach Verschmutzung)
- ✗ Benutzen Sie handwarmes Wasser und ein geeignetes Reinigungsmittel

- ✗ Verschließen Sie vor dem Reinigen die Klettverschlüsse
- ✗ Mit klarem Wasser nachspülen und Reinigungsmittelreste wegspülen
- ✗ Vor Gebrauch an der Luft vollständig trocknen lassen

BESONDERS WICHTIG

Waschen Sie die Kopfbänderung nicht in der Waschmaschine. Trocknen Sie die Kopfbänderung niemals im Wäschetrockner. Nicht bügeln.

5. ATEMLUFTBEFEUCHTER (FALLS VORHANDEN)

- ✗ Täglich reinigen
- ✗ Benutzen Sie handwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel
- ✗ Ersatzteile (wenn möglich) voneinander trennen und nur im trockenen Zustand die Einzelteile wieder zusammenbauen
- ✗ Ggf. mit handelsüblichen Mitteln entkalken
- ✗ Mit klarem Wasser nachspülen und Reinigungsmittelreste wegspülen
- ✗ Vor Gebrauch an der Luft vollständig trocknen lassen

BESONDERS WICHTIG

Täglich frisches abgekochtes Wasser einfüllen und Wasser vom Vortag entleeren.

6. FILTERSYSTEM

Die Geräte sind mit unterschiedlichen Filtersystemen ausgestattet. Sie können Feinfilter und/oder Grobfilter enthalten.

FEINFILTER (i.d.R. WEISS)

Nach 4-6 Wochen entsorgen (nicht waschen!)

GROBFILTER (i.d.R. GRAU oder BRAUN)

Wöchentlich mit klarem Wasser waschen und vor dem Einsetzen trocknen lassen. Einmal jährlich austauschen.